


DEEP OSCILLATION®

La oscilación profunda (DEEP OSCILLATION®) es un método de terapia único, patentado internacionalmente, no invasivo y no traumático. Mediante el uso de la atracción y la fricción, los impulsos electrostáticos hacen que el tejido tratado experimente agradables vibraciones con un efecto de profundidad biológica. A diferencia de otras formas de terapia, estas vibraciones tienen un efecto extremadamente suave y profundo en todos los componentes del tejido (piel, tejido conductor, tejido adiposo subcutáneo, músculos, vasos sanguíneos y linfáticos).

Para la terapia, el paciente sostiene un elemento de contacto de titanio entre los dedos. Bajo los guantes especiales del terapeuta o un aplicador manual con una estructura especial (segundo contacto) que se mueve en un movimiento circular sobre el tejido, se crea el agradable efecto terapéutico de la oscilación profunda.

El modo de acción extremadamente suave, la posibilidad de aplicarlo tempranamente, así como los efectos clínicos específicos del tratamiento, hacen de la oscilación profunda una opción de terapia única, para muchas áreas clínicas y también en indicaciones donde muchas veces otras formas de terapia convencional están contraindicadas.

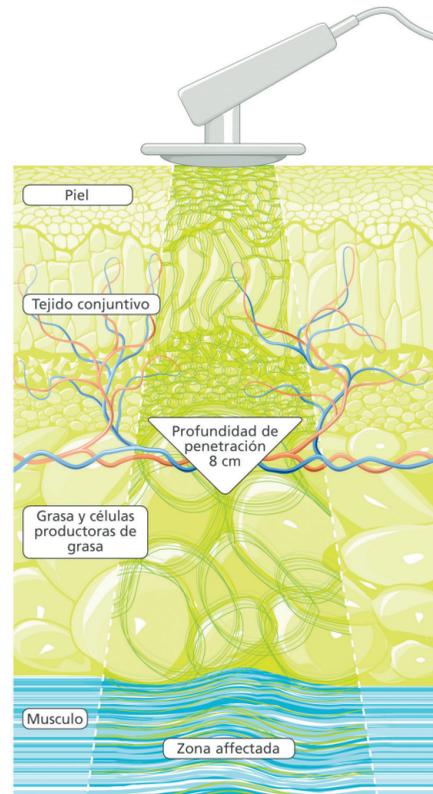

Se han documentado clínicamente los siguientes efectos de la terapia con DEEP OSCILLATION®

- Gran potencial para reducir el dolor (tanto para episodios de dolor traumático como crónico).
- Profilaxis y reducción del linfedema secundario y primario.
- Relajación muscular, efecto promotor del ejercicio, movilización
- Promoción de los procesos de cicatrización de heridas, especialmente en el caso de quemaduras.

DIRECCIÓN
PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
Hutweide 10
91220 Schnaittach
Germany

TELÉFONO
+49 9126 2587 - 0
FAX
+49 9126 2587 - 25

E-MAIL
info@physiomed.de
WEB
www.physiomed.de



DEEP OSCILLATION® en Linfología

Rehabilitación Vascular Periférica

2023-12. Salvo errores o modificaciones.



Linfedema y Lipedema

La aplicación de la oscilación profunda conduce a una reducción del volumen en el linfedema primario y secundario. El MLD y el KPE pueden intensificarse mediante la oscilación profunda. El DEEP OSCILLATION® se está utilizando también con gran éxito cada vez más para el tratamiento del lipedema.

La oscilación profunda tiene un efecto de suavizar / reducir el tejido fibrótico. En particular, las fibrosis incipientes pueden tratarse eficazmente. Se mejoran significativamente varios parámetros relacionados con la calidad de la piel. Además, la oscilación profunda tiene un efecto significativo en la reducción del dolor.



Terapia Pre y Poscirugía

Mediante la aplicación del DEEP OSCILLATION, antes y después de la cirugía, permite disminuir el edema en menor tiempo, en comparación con las terapias convencionales. Debido a la posibilidad de aplicar tempranamente se reduce el dolor de manera sostenible y se promueve la movilización. Mejorando la calidad del tejido.

La oscilación profunda se utiliza habitualmente como terapia adyuvante antes y después de la operación. Debido a su efecto terapéutico extremadamente suave, la oscilación profunda se utiliza como terapia de „primera opción“ después de la mastectomía, cirugía plástica, cirugía de osteosíntesis, cirugía endoprotésica y cesárea, entre otros tratamientos.



Los efectos clínicos de la oscilación profunda están documentados en más de 60 estudios. Aquí puede encontrar más información y leer los estudios individuales.



Escanee el código QR con su teléfono para acceder.

DEEP OSCILLATION® Evident

Dos canales independientes con botones multifuncionales de dosificación, con función de disminución rápida de dosis a 0 y el cambio rápido entre los canales.



Lista de indicaciones con videos y diferentes filtros de búsqueda.

Con DEEP OSCILLATION® Evident puede iniciar el tratamiento de la forma más rápida y sencilla posible: selección directa de los parámetros de oscilación profunda, a través del índice de indicaciones con muchas sugerencias de tratamiento o la memoria de programas con indicaciones de terapia guardados individualmente por usted. Durante el tratamiento, tiene una visión general constante de todos los valores y temporizadores.

La pantalla táctil, junto con el funcionamiento mediante un solo botón de PHYSIOMED, probado durante décadas, permite un manejo intuitivo y rápido. La oscilación profunda se puede adaptar con precisión al tratamiento deseado en términos de sus características, ajustando individualmente la frecuencia (o banda de frecuencia), el ciclo de trabajo, la función de ráfaga y la duración de la terapia.

La amplia lista de indicaciones con información útil, imágenes y animaciones de video, así como la base de datos de pacientes con una función de popurrí hacen que su uso sea aún más fácil.

En el DEEP OSCILLATION® Evident se pueden integrar hasta tres menús de indicación disponibles.

- CLINICS (para uso en clínicas, hospitales y prácticas de fisioterapia)
- SPORTS (para uso en centros y clínicas de medicina deportiva)
- AESTHETICS (para uso en medicina estética)

DEEP OSCILLATION® Personal



Amplia pantalla a color de alto brillo para una visión perfecta

Manejo sencillo e intuitivo mediante el concepto PHYSIOMED un solo botón

Lista de indicaciones preprogramados para los campos de aplicación más importantes.

El DEEP OSCILLATION® Personal puede utilizarse para aplicar secuencias de programas, previamente cargadas en una tarjeta de terapia con el DEEP OSCILLATION® Evident.

Esto permite una terapia móvil e individualizada en la clínica, así como la continuación del tratamiento del paciente en la casa, con el mismo protocolo establecido. De esta forma, se garantiza la sostenibilidad y repetibilidad de la terapia hasta la próxima cita de tratamiento en la clínica.

También está disponible para pacientes de LIPEDEMA una versión DEEP OSCILLATION® Personal HOME para el tratamiento en casa como terapia conservativa y de mantenimiento.

DEEP OSCILLATION® Personal también está disponible con las tarjetas de terapia Basic y Pro. La variante Basic ofrece una amplia selección de las indicaciones más importantes con parámetros de tratamiento preprogramados, que normalmente constan de diferentes secciones de tratamiento con diferentes frecuencias.

La tarjeta de terapia Pro contiene la misma lista de indicaciones preprogramadas en la Basic y además le permite configurar hasta tres secuencias de terapia para el tratamiento personalizado, brindando la posibilidad de modificar todos los parámetros y ajustarlos a la condición del paciente.